

1



2



3



4



FRANÇAIS

AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF, VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT ET ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES. UNE APPLICATION CORRECTE EST ESSENTIELLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur prévu doit être le patient, un professionnel médical agréé ou le soignant du patient.

L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et d'être physiquement capable d'exécuter les instructions, les avertissements et les mises en garde contenus dans les informations d'utilisation.

UTILISATION / INDICATIONS

La ceinture DonJoy LadyStrap est conçue pour apporter un soutien et une stabilisation de la colonne lombaire et soulager les lombalgies.

Conçue pour restreindre les mouvements grâce à une structure élastique ou semi-rigide.

Indications : toutes les indications nécessitant un soutien et une stabilisation de la colonne lombaire, telles que :

- Douleur lombaire aiguë.
- Prévention du mal de dos, retour aux activités
- Entorse dorsale
- Faiblesse musculaire
- Discopathies lombaires (traitement conservateur)

CONTRE-INDICATIONS

- Toute allergie connue aux matériaux du dispositif médical.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Si vous souffrez d'affections cutanées/traumatismes dans la partie du corps concernée, le produit ne doit être adapté et porté qu'après consultation d'un professionnel de la santé.
- Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes.
- Si des douleurs, des gonflements, des changements de sensation ou d'autres réactions inhabituelles surviennent pendant l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement votre médecin.
- Le produit doit être retiré pendant les longues périodes de repos.
- N'utilisez pas ce dispositif s'il a été endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- Manipulez avec soin : évitez d'attacher la fermeture du crochet de la sangle sur la partie tricotée, car elle peut endommager l'apparence du produit lorsque la sangle est retirée.

REMARQUE : Contactez le fabricant et les autorités compétentes en cas d'incident grave lié à l'utilisation de cet appareil.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, D'INSTALLATION ET D'APPLICATION

1) Placez le support lombaire autour de la taille, en utilisant les passe-mains.

Veillez à ce que la ceinture lombaire soit bien centrée sur votre colonne vertébrale.

2) Tirez le plastron vers l'avant pour régler le niveau de compression en fonction de vos besoins et de votre niveau de douleur.

3) Fixez le plastron à l'aide de la fermeture auto-agrippante.

4) Pour un soutien supplémentaire, utilisez la sangle de rappel amovible et son coussin dorsal.

Tirez sur les deux bords de la sangle élastique jusqu'à ce que le niveau de soutien et de compression souhaité soit atteint.

Fixez-les sur la fermeture avant de la ceinture lombaire à l'aide des parties auto-agrippantes.

Il est possible de modifier la position de la sangle de rappel et du coussin dorsal (réglable en hauteur) pour cibler la zone de douleur.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine au cycle délicat (max 40°C) avec une lessive douce.

Les parties auto-agrippantes doivent être fermées pour le lavage.

Ne pas utiliser d'agent de blanchiment. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

COMPOSITION

Polyamide, Elasthan, Polyester, Acier, Polyuréthane, Polycarbonate.



NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente. Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.