



LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF S'ADRESSE :

L'utilisateur doit être capable de :

- lire et comprendre les instructions, les avertissements et les mises en garde.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS : Utilisation post-opératoire à la suite d'une intervention mini-invasive sur la hanche ; réparation du labrum, avec ou sans réparation du moyen fessier ; contrôle de l'amplitude des mouvements après une chirurgie primaire ou une chirurgie de reprise de la hanche ; utilisation post-opératoire après la réparation proximale des ischio-jambiers.

CONTRE-INDICATIONS : Problèmes pulmonaires, cardiovasculaires ou osseux que la compression et/ou la pression risquent d'aggraver, fractures déplacées, instables.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : En cas de douleur, d'enflure, d'altération des sensations ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION : Pour des résultats optimaux, installer le produit sur le patient avant l'intervention chirurgicale.

DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF : VersaROM Hip est adaptée pour la plupart des tours de taille allant de 64 cm à 135 cm (25 po à 53 po)

1. Mesurer la taille au niveau du nombril.
2. Aligner le bord du composant de la ceinture arrière sur une marque sur la bande de mesure correspondant à la mesure du tour de taille relevée. Réengager complètement les deux composants. (Figure A)
3. Pour les patients dont le tour de taille est INFÉRIEUR à 86 cm (34 po) :
Dégager les ailettes latérales des composants de la ceinture arrière. Retirer et jeter les ailettes latérales (Figure B). Rattacher le composant de ceinture modifié au composant de la ceinture arrière. Si la ceinture est coupée, repérer les deux adaptateurs à boucle et crochet de couleur noire dans l'emballage. Attacher les adaptateurs à boucle et crochet à la ceinture arrière de façon à recouvrir toute zone auto-agrippante exposée.

Remarque : Pour les patients dont le tour de taille est supérieur à 135 cm (53 po), une ceinture d'extension est incluse dans l'emballage.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION :

4. Enrouler la ceinture environ 2,5 cm (1 po) au-dessus de la partie la plus large des hanches et fixer le crochet et la boucle sur le devant des patients. (Figure C)
5. Préparer l'ensemble coque pelvienne/charnière pour la mise en place. Régler les butées de flexion et d'extension en appuyant sur le bouton central situé sur la face de la charnière et en déplaçant chaque languette respective vers les positions désirées. (Figure D)

Remarque : S'assurer que le bouton central revient en position complètement verrouillée. Un déclic est émis et le bouton central ressort lorsqu'il est verrouillé.

6. NE PAS retirer la languette rouge « détachable » de la coque pelvienne ni la « bande protectrice » rouge qui se trouve sur le composant de la cuisse. Placer l'ensemble coque pelvienne/charnière de manière à ce qu'il soit centré latéralement, avec le haut aligné juste au-dessous du bord supérieur de la ceinture. Le repositionner si nécessaire. (Figure E)

Remarque : Il y a deux changements de pivot. Un changement de pivot est situé au-dessus de l'amplitude de mouvement et l'autre est situé en dessous de l'amplitude de mouvement. En poussant les boutons encastrés situés au centre de chaque pivot, les angles d'abduction/adduction sont modifiés, ce qui permet d'obtenir l'angle souhaité avec le moins de protrusion de la charnière. (Figure F)

7. Une fois que le composant pelvien est correctement positionné, détacher la languette rouge de la coque pelvienne et engager complètement les ailettes à boucle et crochet. (Figure G)

8. Faire glisser le composant de la cuisse le long de la barre distale jusqu'à la position souhaitée. Veiller à laisser suffisamment d'espace pour le mouvement du genou. Repositionner si nécessaire sans retirer la bande de protection rouge. Une fois que le composant de la cuisse se trouve dans la position souhaitée, retirer la bande de protection rouge afin d'exposer complètement le mécanisme à boucle et crochet agressif en dessous. Appuyer fermement la coque contre la barre distale pour engager complètement le crochet et la boucle. (Figure H)
9. Enrouler la sangle de cuisse autour de la jambe et appliquer la languette à crochet et à boucle.
Remarque : Pour régler la sangle de la cuisse, détacher la languette brillante afin d'exposer les extrémités de la sangle. Couper la sangle et appliquer à nouveau la patte du crochet. Veiller à ne pas couper la sangle trop courte. (Figure I)
10. Tirer sur les languettes de traction et les fixer à l'avant de la ceinture. (Figure J)

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DE LA LANGUETTE DE TRACTION (FACULTATIF)

11. Retirer la bobine à lacet de la poche à languette et enrouler le lacet autour de la bobine pour raccourcir la longueur de la languette. Dérouler le lacet pour allonger la languette. (Figure K)

VERROUILLAGE DE L'ORTHÈSE (FACULTATIF)

12. Le cas échéant, le clinicien peut verrouiller l'amplitude de mouvement en flexion/extension de l'articulation de la hanche. Localiser la vis située à l'intérieur de la coque pelvienne et la serrer à l'aide de l'outil fourni. (Figure L)

REMBOURRAGE SUPPLÉMENTAIRE

13. Le cas échéant, fixer le coussinet à mi-cuisse comme illustré. (Figure M)

RETRAIT DE L'ORTHÈSE

14. Pour retirer l'orthèse de hanche, détacher les languettes de traction situées sur le côté de la ceinture, puis desserrer la ceinture et l'embrasse de la cuisse. Retirer l'orthèse de hanche.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :



Laver à la main à l'eau (30 °C/86 °F) et au savon doux.
Laisser sécher à l'air libre.

REMARQUE : Si le produit n'est pas suffisamment rincé, les résidus de savon peuvent provoquer des irritations et endommager le matériau.



NE PAS laver.



NE PAS repasser.



NE PAS nettoyer à sec.



NE PAS utiliser d'eau de javel.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX : Maille : Nylon ;
Écarteur : Polyester ; Attache : Poly/coton.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité ainsi que ses accessoires en cas de défaut matériel ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date d'achat. Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec la réglementation locale, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT.

PRÉVU POUR UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.

FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.