




1

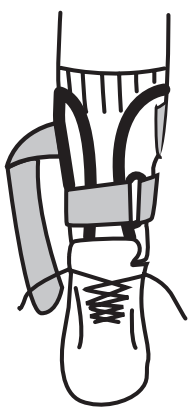

2

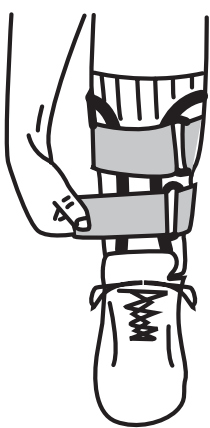

3

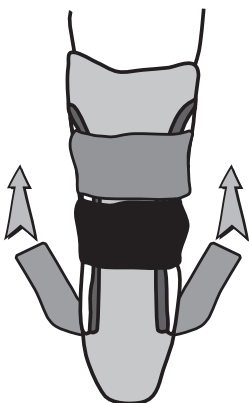

4

FRANÇAIS

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES COMPLÈTEMENT ET ATTENTIVEMENT. UNE UTILISATION CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.

UTILISATION/INDICATIONS : Blessures graves de la cheville.

REMARQUE: l'orthèse de cheville Surround gel doit être portée sur une socquette ou sur une fine chaussette en coton.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou de toute autre réaction anormale lors de l'utilisation de ce produit, se mettre en rapport immédiatement avec le professionnel de la santé concerné.

MISE EN PLACE :

- 1) Ouvrez l'étrier de cheville de façon à ce que le gel et la mousse alvéolée soient tournés vers le haut.
- 2) Placez le talon au milieu de la sangle talonnière. Pour assurer un bon alignement, enrroulez la sangle de fermeture par contact inférieure autour de la cheville. Centrez les coquilles latérales le long de la cheville et de la jambe. Enroulez la sangle supérieure et ajustez selon les besoins.
- 3) Appuyez sur les côtés de la poche de gel thérapeutique pour que la pression à l'intérieur des coques en plastique soit régulière. Resserrez les sangles inférieures et supérieures pour que l'orthèse soit bien ajustée et que le confort du patient soit assuré. Il est possible de couper les sangles, si nécessaire.
- 4) Ajustez les sangles latérales verticales en les saisissant à deux mains et en tirant vers le haut jusqu'à obtenir le réglage voulu. Fixez les sangles latérales verticales à l'aide du système de fermeture par contact.

CRYOTHÉRAPIE:

- Retirez la poche de gel thérapeutique de chaque coque et placez-les 2 heures au congélateur.
- CONGELER UNIQUEMENT la poche de gel. NE PAS METTRE tout l'ensemble de l'orthèse dans le congélateur.
- Insérez la poche de gel dans l'orthèse et suivez les instructions de mise en place.
- REMARQUE : enfiler une chaussette absorbante avant de mettre l'orthèse en place.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN : Laver manuellement à l'eau froide, avec du savon doux, puis rincer intégralement. LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE. Remarque: Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.

GARANTIE: DJO LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ces accessoires pour tout défaut de matériel ou de façon pour une période de six mois à compter de la date de vente.

POUR UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.

SANS LATEX

AVIS : LA FABRICATION DE CE PRODUIT A FAIT L'OBJET DE TOUS LES EFFORTS POSSIBLES ET DES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES AFIN D'ASSURER UNE COMPATIBILITÉ, UNE ROBUSTESSE, UNE DURABILITÉ ET UN CONFORT DE PLUS HAUT NIVEAU. CE PRODUIT NE CONSTITUE QU'UN DES ÉLÉMENTS DU TRAITEMENT PRESCRIT PAR UN MÉDECIN. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUTE BLESSURE.